

FORCE カーボン スライディングボード 取扱説明書

品番：MP90435-00-00

はじめに

この度は、弊社製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。ご使用の前に本書を必ずお読みになり、十分に理解をした上でお使いください。また、本書はいつでもご覧になれる所に大切に保管しておいてください。使用者の身体の状況・環境の変化に合わせて、必要なときに本書をお読みください。

安全上のご注意

⚠ 危険 (死亡または重傷を招く可能性があるもの)

- ❗ はじめてお使いになる際は、専門家(作業療法士、理学療法士、福祉用具専門相談員など)もしくは販売店の指導のもと操作方法を習得して、本製品の特徴をよく理解したうえで使用すること。

⚠ 警告 (死亡または重傷を招く可能性があるもの)

- ⊘ 移乗以外の用途では使用しない。
- ❗ 最大使用者体重を守る。
- ❗ 移乗の際に本製品が動いたり外れたりしないよう、すべり止めの対策を行う。
- ⊘ 破損や異常があった場合は本製品を使用しない。
- ❗ 移乗時は、衣類などを着用する。
- ❗ 移乗の際は、必ず車いすの両輪の駐車用ブレーキをかける。
- ⊘ 落下させたり、衝撃を与えない。
- ⊘ 突起物やかたいものにぶつけない。
- ⊘ 火の中に入れたり、高温多湿の場所に放置しない。
- ❗ 移乗する対象物との高低差は、なるべく少ない状態にして使用する。


⚠ 注意 (軽傷または物的損害を招く可能性があるもの)

- ⊘ 子供が触れやすい場所には放置しない。
- ⊘ シンナー、ベンジン等の溶剤は使用しない。
- ⊘ 暖房器具に近づけない。

内容物／各部のなまえ



- ・ 本体 (スライディングボード)
- ・ 取扱説明書／保証書(本書)

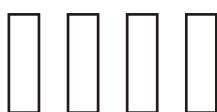

- ・ すべり止めテープ 4枚

仕様

寸 法：幅240×長さ780×厚み8mm
材 質：カーボン
重 量：770g
耐荷重：130kg

* 本書では、本体 (スライディングボード) を、「本製品」または「ボード」と記載します。

ご使用の前に

はじめてお使いになる前に、使用状況に合わせて、すべり止めテープを本製品に貼り付けてください。



貼り付け例

⚠ 警告

すべり止めテープの貼り付けは、専門家(作業療法士、理学療法士、福祉用具専門相談員など)もしくは販売店の指導のもと、適切な位置に貼り付けてください。

⚠ 注意

使用する場所に応じて本製品の両面を使用される場合は、移乗対象物(ベッド・自動車など)にもすべり止めの対策を行ってください。

使いかた


⚠ 警告

- ・裏面に貼り付けたすべり止めテープが、車いすの座面と、ベッド上、または自動車のシートに当たるようにしてください。
- ・必ず車いすの両輪の駐車用ブレーキをかけてから、使用してください。


ベッドとの移乗

⚠ 警告


ベッドの高さ調整ができる場合は、できるだけ車いすの座面と高さが揃うように、ベッドの高さを調節してから使用してください。

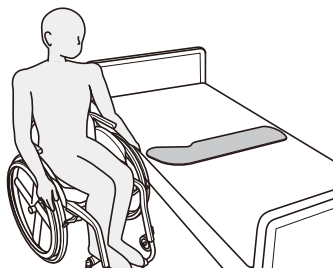


- 1 車いすをベッドに近づけます。
(車いすとベッドの角度の目安：約30°)

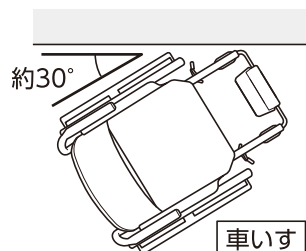

- 2 車いすの両輪の駐車用ブレーキをかけます。

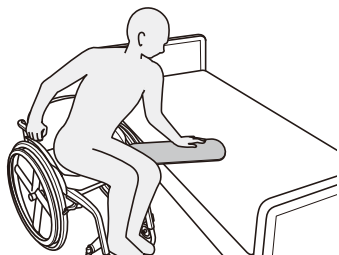


- 3 お尻の下にボードを差し込みます。
* ボードのくぼみ側が車いすのタイヤに沿うように、位置を合わせてください。

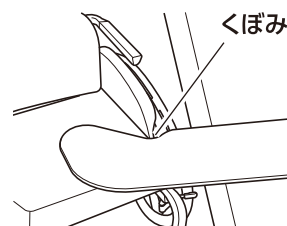


- 4 ボードの反対側をベッドの上に乗せます。

ボードの位置

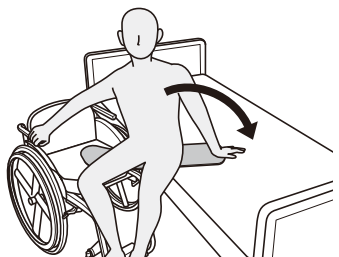

- 5 お尻を滑らせて、ゆっくりとボードの上をベッドへ移動します。

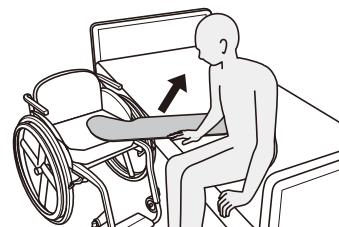

- 6 ベッドにお尻のすべてが乗っていることを確認してから、ボードを引き抜きます。

自動車との移乗


⚠ 危険

- 自動車との移乗は、使用者の傷害レベルや自動車の車種によって、移乗の方法が異なります。はじめてお使いになる際は、専門家（作業療法士、理学療法士、福祉用具専門相談員など）もしくは販売店の指導のもと操作の練習を行い、確実に操作ができることを確認してから使用してください。
- 使用者ひとりで移乗ができない場合は、介助者を伴うか、使用を中止してください。

⚠ 警告


- 自動車のシートの高さ調整ができる場合は、できるだけ車いすの座面と高さが揃うように調節してから使用してください。
また、クッションなどを使用して、段差を解消することも検討してください。
- ボードを載せたとき、車いすの座面と自動車のシートの高さの傾斜が大きい場合は、本製品を使用しないでください。

* 本書では基本的な操作を説明しています。実際の使用は専門家の指導のもと行ってください。

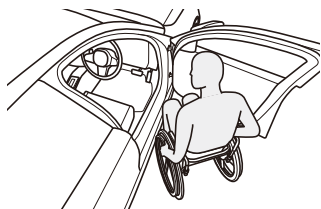

1 車いすを自動車に近づけます。


2 車いすの両輪の駐車用ブレーキをかけます。

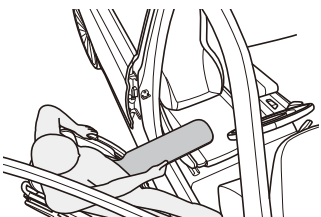


3 お尻の下にボードを差し込みます。

* ボードのくぼみが車いすのタイヤに沿うように、位置を合わせてください。


4 ボードの反対側を自動車のシートの上に乗せます。

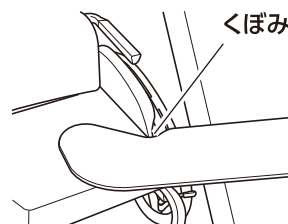

ボードの位置

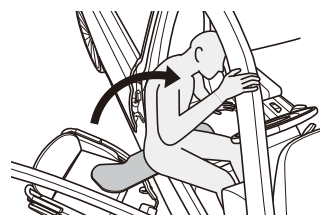

5 お尻を滑らせて、ゆっくりとボードの上を自動車へ移動します。

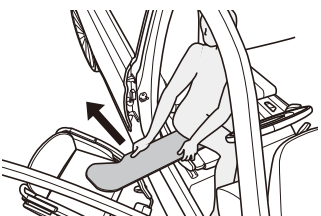

6 自動車のシートにお尻のすべてが乗っていることを確認してから、ボードを引き抜きます。

操作についての
動画はこちら



使用上のご注意

製品の汚れは、中性洗剤を含ませたタオルかスポンジで拭き取ってください。拭き取った後は、乾いた布で水分を拭き取り、十分に乾かしてください。

⚠ 注意

- シンナー、ベンジン等の溶剤は使用しないでください。製品を傷める恐れがあります。
- 本体や各部品を乾かすときは、直射日光をさけて陰干ししてください。

アフターサービス

- ・万一故障の場合は、お買い上げの販売店、または弊社へこの商品の品名と故障状況を連絡してください。
- ・保証期間内の修理につきましては、保証書の提示が必要です。

保証

- ・保証内容につきましては、添付の保証書をお読みください。
- ・保証期間終了後の修理につきましては、お買い上げの販売店、または弊社へお申しつけください。
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有償修理いたします。

保証書

保証の範囲

- ・取扱説明書に基づいた正常な使用状態で異常や故障が発生した場合、無償修理をいたします。
- ・本製品の保証期間はご購入日より1年間です。
- ・次の場合は保証期間中でも有償修理といたします。
 - 1) 使用上の誤り及び取扱不注意による破損・落下など、外部からの衝撃による破損・故障
 - 2) 地震、台風、水害などの天災及び事故、火災による焼失・破損
 - 3) 保全上の不備および弊社以外で行った修理や改造による破損
 - 4) 弊社が指定する純正部品以外の部品等の使用により発生した破損
 - 5) 保証書にお買い上げ日、販売店名の記載・捺印がない場合
 - 6) 保証書のご提示がない場合
 - 7) 譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合
- ・この保証書は日本国内においてのみ有効です。
This guarantee is valid only within Japan.
- ・この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

サービスのご用命

保証期間中、万一故障が生じた場合はお買い上げの販売店へ保証書を添えてお申し出ください。

ご注意

保証書は再発行いたしません。大切に保管してください。

※お買い上げ日、販売店名の記載・捺印のない場合無効となります。

ご住所 〒	販売店 住所
TEL	店名
お名前	
お買い上げ日	TEL
年 月 日	印

製造元

 **Wheel Chair Miki** 株式会社 ミキ

〒457-0863 名古屋市南区豊三丁目38番10号
TEL 0570-00-3993 FAX 0568-66-6335

※愛知県への通話料が発生します。

本書で使用している画像・イラストは、ご購入いただいた製品と異なる場合があります。
製品向上のため、本書に記載している仕様の全部、または一部を予告なく変更することがあります。
本製品の廃棄につきましては、最寄りの行政担当窓口におたずねください。