

SKT_JUXPlus操作コントローラー取付手順書

この度は、本製品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。ご使用前に本書を必ずお読みいただき、理解し適切に取扱いしてください。また、本書はいつでもご覧になれる所に保管しておいてください。

はじめにご確認ください

本手順には下記の部品が必要となります。ご確認ください。

	品名	数量
①※	アッパホルダセット(スライド式)	1
②	M6*25キャップボルト(黒)	2
③	M6*12ボタンキャップボルト(黒)	2
④	6.0*13*1.0平ワッシャー(黒)	4
⑤	M6スプリングワッシャー(黒)	4
⑥	結束バンド(黒)	9



①※アッパホルダセット(スライド式)は電動ユニットに同梱されています。

①※

②

③

④

⑤

注意・警告

- ・本製品の取付けは、駐車用ブレーキをかけ、平坦な場所で行ってください。
- ・こちらはSKT_JUXPlus専用の操作コントローラーとなります。他の商品には取付ないでください。



作業手順

[使用工具] 六角レンチ 4mm/5mm

作業方法

1.操作コントローラーを車いすに取付ける

- ①作業しやすいように取付け側のアームパイプを跳ね上げます。
- ②アームパイプ前方の穴部(A)とアッパホルダセットの穴部(B)が合うように配置し、六角レンチを使用してアームパイプ前方の穴部にスプリングワッシャーと平ワッシャーを通したM6*25キャップボルトを取付けます(C)。(締め付けトルク6~8N・m)
- ③アッパホルダセット取付後、YAMAHAの「ジョイユニットXPLUS+組付説明書」の23ページを参考にコントローラーを取り付けます。(D)

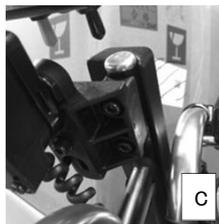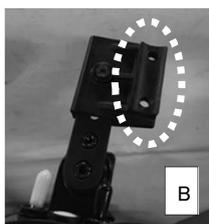

2.取付けない側のアームパイプの穴をふさぐ

- ①六角レンチを使用してアームパイプ前方の穴部にスプリングワッシャーと平ワッシャーを通したM6*12ボタンキャップボルトを取付けます(E)。(締め付けトルク6~8N・m)



3.ワイヤーをフレームに固定する(右取付、左取付)

車いす走行時や、アームサポート跳ね上げ時などに支障が出ないよう、

結束バンドを使用してワイヤーをフレームに固定します。


※結束バンドをきつく締めすぎるとワイヤーが破損する恐れがあるので、少し余裕を持たせるようにしてください。

コントローラー右取付

①写真の2箇所を固定します。(E)




②アームサポート後方の1箇所を固定します。(F)


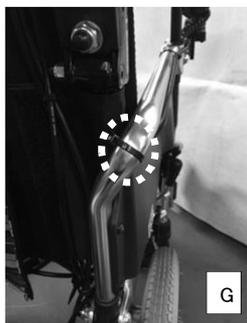


コントローラー左取付

①右側取付時と同様に、アームサポートの3箇所(H)を固定します。

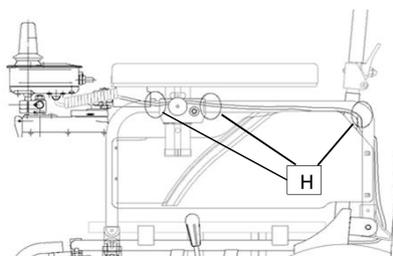

②リヤパイプの3箇所(I)とベースパイプの1箇所(J)に固定します。

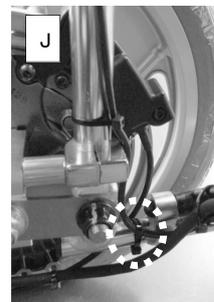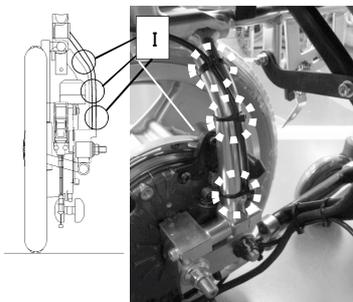

③エクスパイプの2箇所(K)に固定します。



リヤパイプ取付け

ベースパイプ取付け